

 PIRAQUARA Secretaria de Saúde de Piraquara	Departamento de Atenção à Saúde Telefone: (41) 3590-3708 saude.dab@piraquara.pr.gov.br		Coordenação de Atenção à Saúde
			Código: POP AS 30
	LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS ALMOTOLIAS		Revisão: 06/12/2024
	Elaborador: Enfª Hellen Martins	Revisor: Enfª Ramony F. Martins, Enfª Camila M. Costa de Oliveira, Enfª Carolina de Andrade Sousa	Data da elaboração: 07/08/2018
	Aprovador: Comissão de Padronização dos Serviços de Saúde		Quantidade de Páginas: 2

1. INTRODUÇÃO

Realizar a remoção física por ação mecânica da sujidade, promovendo a redução de microrganismos das superfícies de cada almotolia.

2. EXECUTORES

- ✓ Enfermeiro, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, Auxiliar/Técnico de Saúde Bucal.

3. OBJETIVO

- ✓ Reduzir a carga microbiana das almotolias, prevenir a contaminação das soluções fracionadas.

4. MATERIAIS

- ✓ Balde ou bacia com tampa;
- ✓ Fita adesiva para identificação dos recipientes com soluções;
- ✓ EPI (avental impermeável, touca, máscara cirúrgica, óculos de proteção, luvas e sapato fechado);
- ✓ Hipoclorito de sódio a 1%;
- ✓ Solução de água e detergente;
- ✓ Gaze, compressas ou panos limpos e secos;
- ✓ Pia com torneira e água limpa.

5. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

- ✓ Higienizar as mãos, antes e após o procedimento;
- ✓ Paramentar-se com os EPIs;
- ✓ Levar as almotolias à pia do expurgo;
- ✓ Retirar as etiquetas de identificação das embalagens;
- ✓ Esvaziar as almotolias, desprezando a solução na pia;
- ✓ Lavar externamente e internamente, incluindo a tampa, com solução de água e detergente usando a gaze;
- ✓ Enxaguar abundantemente por dentro e por fora em água corrente;
- ✓ Colocar as almotolias e tampas para escorrer sobre uma bancada forrada, retirando o excesso de água;

 PIRAQUARA Secretaria de Saúde de Piraquara	Departamento de Atenção à Saúde Telefone: (41) 3590-3708 saude.dab@piraquara.pr.gov.br		Coordenação de Atenção á Saúde
			Código: POP AS 30
	LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS ALMOTOLIAS		Revisão: 06/12/2024
	Elaborador: Enfª Hellen Martins	Revisor: Enfª Ramony F. Martins, Enfª Camila M. Costa de Oliveira, Enfª Carolina de Andrade Sousa	Data da elaboração: 07/08/2018
	Aprovador: Comissão de Padronização dos Serviços de Saúde		Quantidade de Páginas: 2

- ✓ Para desinfecção química, imergir as almotolias em solução de hipoclorito a 1% sem diluição por 30 minutos, em recipiente identificado com: nome do produto, data do preparo, validade da solução e nome do profissional;
- ✓ Retirar o material da solução de hipoclorito, enxaguar rigorosamente em água corrente e deixar escorrer sobre uma bancada forrada e aguardar até secar completamente;
- ✓ Trocar as luvas para reabastecer, preencher as almotolias até, no máximo, 2/3 da sua capacidade;
- ✓ Colar as etiquetas nas almotolias identificando o tipo de solução, concentração, data do envase e da validade e nome do responsável pelo fracionamento;
- ✓ Deixar o expurgo limpo e em ordem;
- ✓ Retirar os EPI's e realizar a Técnica de Higiene Simples das Mãos;
- ✓ Registrar em livro próprio a data, a solução fracionada, a quantidade de almotolias processadas, carimbar e assinar;
- ✓ Distribuir as almotolias nos setores necessários;
- ✓ As almotolias vazias deverão ser acondicionadas em local limpo e seco.

6. OBSERVAÇÕES

- ✓ Procedimento realizado após o término da solução envasada ou no máximo a cada 07 (sete) dias e quando almotolia estiver sem identificação;
- ✓ Nunca reabastecer as almotolias sem limpeza e desinfecção prévia.

7. HISTÓRICO DE REVISÃO DO POP

Nº da Revisão	Item	Alteração	Data da Elaboração
01	1 ao 3	Introdução, Executores, Objetivo, observações e Formatação.	07/08/2018
02	-	-	06/12/2024

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

SUZANO, SÃO PAULO. Manual: Procedimentos Operacionais Padrão – POPs.2021 23 p.

Hospital Universitário do Vale de São Francisco, PERNAMBUCO. Manual: Procedimentos Operacionais Padrão – POPs.2020. 1-5 p.