

|                                                                                                                                                            |                                                                                                |                                                                        |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <br><b>PIRAQUARA</b><br>PREFEITURA<br>Secretaria de Saúde de<br>Piraquara | <b>Departamento de Atenção à Saúde</b><br>Saude.dab@piraquara.pr.gov.br<br>Tel: (41) 3590 3708 |                                                                        | Coordenação de Atenção<br>à Saúde        |
|                                                                                                                                                            | <b>LIMPEZA DA AUTOCLAVE</b>                                                                    |                                                                        | Código: POP AS 33                        |
|                                                                                                                                                            | <b>Elaborador: Enfª Ramony Filippini Martins</b>                                               | <b>Revisor: Enfª Alice Costa Silva, Enfª Carolina de Andrade Sousa</b> | <b>Data da elaboração:</b><br>21/09/2018 |
|                                                                                                                                                            | <b>Aprovador: Comissão de Padronização dos Serviços de Saúde</b>                               |                                                                        | <b>Número de Páginas: 2</b>              |

## 1. INTRODUÇÃO

A limpeza das autoclaves refere-se ao processo de remoção da sujidade visível (orgânica e inorgânica) da autoclave, mediante uso de água e sabão líquido neutro.

## 2. EXECUTORES

- ✓ Auxiliar e Técnico de Enfermagem;
- ✓ Auxiliar e Técnico em Saúde bucal.

## 3. OBJETIVOS

- ✓ Manter o equipamento limpo para receber o material que será esterilizado para garantir condições adequadas de funcionamento, deixando-o livres de substâncias que possam interferir no processo.

## 4. MATERIAIS

- ✓ EPI's (máscara, gorro, luva de borracha, óculos de proteção, avental, botas);
- ✓ Recipiente plástico exclusivo para este fim;
- ✓ Detergente neutro;
- ✓ Água;
- ✓ Esponja/escova;
- ✓ Compressa de gaze estéril;

## 5. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

- ✓ Utilizar EPI (máscara, gorro, luva de borracha, botas, óculos de proteção, avental).
- ✓ Verificar se o equipamento está frio e desligado (porta do equipamento aberta, chave liga/desliga na posição desliga).
- ✓ Realizar a higienização das mãos (Ver POP AS 02).
- ✓ Calçar luvas de borracha.
- ✓ Embeber esponja com sabão líquido.
- ✓ Lavar toda a superfície da câmara interna com água e sabão líquido.
- ✓ Remover o sabão líquido com a compressa de gaze umedecida em água limpa.
- ✓ Repetir a operação tantas vezes quanto necessário para completa remoção do sabão.
- ✓ Secar com outra compressa de gaze.
- ✓ Repetir procedimento na parte externa do equipamento.
- ✓ Realizar a higienização das mãos (Ver POP AS 02).

|                                                                                                                                                            |                                                                                                |                                                                 |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <br><b>PIRAQUARA</b><br>PREFEITURA<br>Secretaria de Saúde de<br>Piraquara | <b>Departamento de Atenção à Saúde</b><br>Saude.dab@piraquara.pr.gov.br<br>Tel: (41) 3590 3708 |                                                                 | Coordenação de Atenção à Saúde |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                |                                                                 | Código: POP AS 33              |
|                                                                                                                                                            | LIMPEZA DA AUTOCLAVE                                                                           |                                                                 | Revisão: 06/12/2024            |
|                                                                                                                                                            | Elaborador: Enfª Ramony Filippini Martins                                                      | Revisor: Enfª Alice Costa Silva, Enfª Carolina de Andrade Sousa | Data da elaboração: 21/09/2018 |
|                                                                                                                                                            | Aprovador: Comissão de Padronização dos Serviços de Saúde                                      |                                                                 | Número de Páginas: 2           |

### 5.1 Periodicidade de limpeza

- ✓ **Diariamente** as autoclaves deverão ser limpas antes da primeira carga.

## 6. HISTÓRICO DE REVISÃO DO POP

| Nº da Revisão | Item | Alteração | Data da Alteração |
|---------------|------|-----------|-------------------|
| 01            | -    | -         | 14/01/2022        |
| 02            | -    | -         | 06/12/2024        |

## 7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARILLI, A.L.A.; NASCIMENTO G.M.; PEREIRA, M.C.A., et.al. Manual de qualificação de esterilização em autoclaves - Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto/SMS/CCII/SUS – SP 2009.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENFERMEIROS DE CENTRO CIRÚRGICO, RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA E CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO (SOBECC). Práticas Recomendadas: Centro cirúrgico, recuperação pós-anestésica e centro de material e esterilização, 7 ed. São Paulo: SOBECC; 2017