

 <p>PIRAQUARA PREFEITURA Secretaria de Saúde de Piraquara</p>	Departamento de Atenção à Saúde Saude.dab@piraquara.pr.gov.br Tel: (41) 3590 3708		Coordenação de Atenção à Saúde
			Código: POP AS 17
	LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO LARINGOSCÓPIO		Revisão: 14/01/2022
	Elaborador: Enf ^a Ramony Filippini Martins	Revisor: Enf ^a Alice Costa Silva	Data da elaboração: 21/09/2018
Aprovador: Comissão de Padronização dos Serviços de Saúde		Número de Páginas: 2	

1. INTRODUÇÃO

A organização do consultório que será utilizado para atendimento do usuário favorece o acolhimento e segurança na execução dos procedimentos de saúde que serão utilizados durante a consulta.

2. EXECUTORES

- ✓ Enfermeiro;
- ✓ Auxiliar/Técnico de Enfermagem;

3. OBJETIVOS

- ✓ Garantir a limpeza e desinfecção de cabos e lâminas de laringoscópio após cada uso.

4. MATERIAIS

- ✓ EPI (avental impermeável, máscara cirúrgica, touca, óculos e proteção, luvas de borracha e sapato fechado);
- ✓ Recipiente próprio com tampa para o desinfetante;
- ✓ Compressa limpa e seca ou gaze não estéril;
- ✓ Sabão neutro;
- ✓ Álcool a 70%;
- ✓ Papel grau cirúrgico;
- ✓ Seladora.

5. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

- ✓ Higienizar as mãos, antes e após o procedimento, de acordo com POP AS 02;
- ✓ Paramentar-se com os EPIs, conforme POP AS 05;
- ✓ Desmontar todo o conjunto do laringoscópio e retirar as pilhas;
- ✓ Limpar o cabo do laringoscópio e a lâmina do laringoscópio com gaze umedecida em água e sabão neutro;
- ✓ Remover o sabão com gaze umedecida em água;
- ✓ Seque o cabo e as lâminas com gaze seca;
- ✓ Friccione com álcool a 70% no cabo e lâminas por 20 a 30 segundos;
- ✓ Monte o laringoscópio, teste o seu funcionamento e certifique-se que não há sujidade ou umidade;
- ✓ Guarde o laringoscópio protegido em papel grau cirúrgico e sele a embalagem com a seladora, identificando a validade de 7 DIAS;

 <p>PIRAQUARA PREFEITURA Secretaria de Saúde de Piraquara</p>	Departamento de Atenção à Saúde Saude.dab@piraquara.pr.gov.br Tel: (41) 3590 3708		Coordenação de Atenção à Saúde
			Código: POP AS 17
	LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO LARINGOSCÓPIO		Revisão: 14/01/2022
	Elaborador: Enfª Ramony Filippini Martins	Revisor: Enfª Alice Costa Silva	Data da elaboração: 21/09/2018
Aprovador: Comissão de Padronização dos Serviços de Saúde		Número de Páginas: 2	

- ✓ Retirar os EPI's, conforme POP AS 05, e realizar a Técnica de Higiene das Mãos (POP AS 02);
- ✓ Registrar em livro próprio a data de desinfecção, carimbar e assinar;
- ✓ Manter a sala em ordem.

5.1 Periodicidade de limpeza

- ✓ A desinfecção do material deverá ser realizada cada 7 dias, independentemente de seu uso.

6. OBSERVAÇÕES

- ✓ Caso o laringoscópio seja utilizado, o mesmo deverá seguir a rotina de limpeza com detergente enzimático e, posteriormente, deverá ser realizada a desinfecção com álcool 70% no cabo do laringoscópio e nas lâminas. Após o processo de secagem, realizar a embalagem em papel grau cirúrgico, identificar o pacote e colocar a data de desinfecção e data de validade (7 dias).

7. HISTÓRICO DE REVISÃO DO POP

Nº da Revisão	Item	Alteração	Data da Alteração
01	-	-	14/01/2022

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Infecções do trato respiratório. Orientações para prevenção de infecções relacionadas à assistência à saúde- Brasília: Anvisa, 2009.

Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária–Brasília: Anvisa, 2017.

BRASIL. ANVISA. Nota Técnica nº 26/2020/SEI/COSAN/GHCOS/DIRE3/ANVISA. Recomendações sobre produtos saneantes que possam substituir o álcool 70% na desinfecção de superfícies, durante a pandemia da COVID-19. Disponível em: <
<https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/atencao-mulher/medidas-de-prevencao-e-controle-da-covid-19-limpeza-desinfeccao-e-tipos-de-precaucoes/>> Acesso em: 10 de jan 2022.