

 <p>PIRAQUARA PREFEITURA Secretaria de Saúde de Piraquara</p>	Departamento de Atenção à Saúde Saude.dab@piraquara.pr.gov.br Tel: (41) 3590 3708		Coordenação de Atenção à Saúde
			Código: POP AS 33
	LIMPEZA DA AUTOCLAVE		Revisão: 14/01/2022
	Elaborador: Enf ^a Ramony Filippini Martins	Revisor: Enf ^a Alice Costa Silva	Data da elaboração: 21/09/2018
Aprovador: Comissão de Padronização dos Serviços de Saúde		Número de Páginas: 2	

1. INTRODUÇÃO

A limpeza das autoclaves refere-se ao processo de remoção da sujidade visível (orgânica e inorgânica) da autoclave, mediante uso de água e sabão líquido neutro.

2. EXECUTORES

- ✓ Auxiliar e Técnico de Enfermagem;
- ✓ Auxiliar e Técnico em Saúde bucal.

3. OBJETIVOS

- ✓ Manter o equipamento limpo para receber o material que será esterilizado para garantir condições adequadas de funcionamento, deixando-o livres de substâncias que possam interferir no processo.

4. MATERIAIS

- ✓ EPI's (máscara, gorro, luva de borracha, óculos de proteção, avental, botas);
- ✓ Recipiente plástico exclusivo para este fim;
- ✓ Detergente neutro;
- ✓ Água;
- ✓ Esponja/escova;
- ✓ Compressa de gaze estéril;

5. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

- ✓ Utilizar EPI (máscara, gorro, luva de borracha, botas, óculos de proteção, avental).
- ✓ Verificar se o equipamento está frio e desligado (porta do equipamento aberta, chave liga/desliga na posição desliga).
- ✓ Realizar a higienização das mãos (Ver POP AS 02).
- ✓ Calçar luvas de borracha.
- ✓ Embeber esponja com sabão líquido.
- ✓ Lavar toda a superfície da câmara interna com água e sabão líquido.
- ✓ Remover o sabão líquido com a compressa de gaze umedecida em água limpa.
- ✓ Repetir a operação tantas vezes quanto necessário para completa remoção do sabão.
- ✓ Secar com outra compressa de gaze.
- ✓ Repetir procedimento na parte externa do equipamento.
- ✓ Realizar a higienização das mãos (Ver POP AS 02).

 <p>PIRAQUARA PREFEITURA Secretaria de Saúde de Piraquara</p>	Departamento de Atenção à Saúde Saude.dab@piraquara.pr.gov.br Tel: (41) 3590 3708		Coordenação de Atenção à Saúde
			Código: POP AS 33
	LIMPEZA DA AUTOCLAVE		Revisão: 14/01/2022
	Elaborador: Enf ^a Ramony Filippini Martins	Revisor: Enf ^a Alice Costa Silva	Data da elaboração: 21/09/2018
Aprovador: Comissão de Padronização dos Serviços de Saúde		Número de Páginas: 2	

5.1 Periodicidade de limpeza

- ✓ **Diariamente** as autoclaves deverão ser limpas antes da primeira carga.

6. HISTÓRICO DE REVISÃO DO POP

Nº da Revisão	Item	Alteração	Data da Alteração
01	-	-	14/01/2022

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARILLI, A.L.A.; NASCIMENTO G.M.; PEREIRA, M.C.A., et.al. Manual de qualificação de esterilização em autoclaves - Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto/SMS/CCII/SUS – SP 2009.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENFERMEIROS DE CENTRO CIRÚRGICO, RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA E CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO (SOBECC). Práticas Recomendadas: Centro cirúrgico, recuperação pós-anestésica e centro de material e esterilização, 7 ed. São Paulo: SOBECC; 2017