

 PIRAQUARA PREFEITURA Secretaria de Saúde de Piraquara	Departamento de Vigilância em Saúde Telefone: 3590-3762 e-mail: saude.vem@piraquara.pr.gov.br		Coordenação de Vigilância em Saúde Código: POP DEVISA 02
	COLETA DE TESTE RÁPIDO COVID-19 - ANTÍGENO		Revisão: 01/11/2022
	Elaborador: Enfª Fernanda Machado	Revisor: Enfª Fernanda Machado e Enfª Fabiane Freitas	Data da elaboração: 10/11/2021
	Aprovador: Comissão de Padronização dos Serviços de Saúde		Número de Páginas: 6

1. INTRODUÇÃO:

A coleta de teste rápido de COVID-19 deverá ser realizada para pacientes sintomáticos, de 1 a 3 dias de sintomas e assintomáticos contato de caso positivo com 5 dias do contato.

2. EXECUTORES:

- ✓ Profissionais da enfermagem;
- ✓ Cirurgiões dentistas;
- ✓ Farmacêuticos;
- ✓ Médicos.

3. OBJETIVOS:

- ✓ Realizar o diagnóstico e o afastamento do paciente positivo o mais breve possível, evitando assim acontaminação de outros contatos.


4. MATERIAIS:

- ✓ EPIs: luva, máscara N95, touca, avental e face shield;
- ✓ Kit de coleta de teste rápido;
- ✓ Ficha de laudo;
- ✓ Ficha de cadastro da coleta.

5. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

5.1 Primeiro passo – identificação

- ✓ Realizar a paramentação com os EPIs, segundo POP AB 05;
- ✓ Realizar o chamamento do paciente e conferir os dados;
- ✓ Preencher a ficha de notificação;
- ✓ Explicar ao paciente como será realizado o exame;
- ✓ Separar o kit de coleta e abrir a bolsa de alumínio onde fica o dispositivo teste, observar se há as duas informações A (teste) e B (cavidade de amostra);

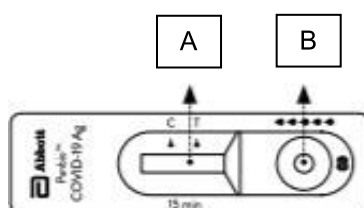


 PIRAQUARA PREFEITURA Secretaria de Saúde de Piraquara	Departamento de Vigilância em Saúde Telefone: 3590-3762 e-mail: saude.vem@piraquara.pr.gov.br		Coordenação de Vigilância em Saúde Código: POP DEVISA 02
	COLETA DE TESTE RÁPIDO COVID-19 - ANTÍGENO		Revisão: 01/11/2022
	Elaborador: Enf ^a Fernanda Machado	Revisor: Enf ^a Fernanda Machado e Enf ^a Fabiane Freitas	Data da elaboração: 10/11/2021
	Aprovador: Comissão de Padronização dos Serviços de Saúde		Número de Páginas: 6

- ✓ Identificar o dispositivo teste com as iniciais do nome do paciente, a data da coleta e a hora da coleta;

5.2 Segundo passo – coleta nasofaríngea


- ✓ Furar o lacre do tubo de tampão da amostra com o auxílio da tampa do tubo, pressionando para abrir completamente o lacre;
- ✓ Remover a tampa do tubo pressionando a parte superior, empurrando-a para fora;
- ✓ Apoiar a tampa em uma superfície limpa, com a cobertura de proteção virada para baixo;

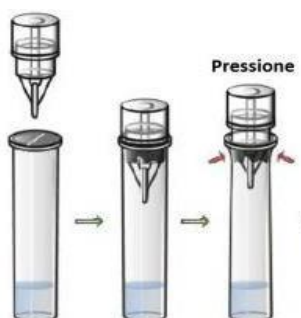


- ✓ Separar o swab e realizar a técnica de inserção nasal, primeiro em uma narina, depois na outra;



- ✓ Insira a amostra do swab no tubo de extração, mergulhando no tampão, girando no mínimo 5vezes. Aperte o tubo pressionando a ponta do swab;


 PIRAQUARA PREFEITURA Secretaria de Saúde de Piraquara	Departamento de Vigilância em Saúde Telefone: 3590-3762 e-mail: saude.vem@piraquara.pr.gov.br		Coordenação de Vigilância em Saúde Código: POP DEVISA 02
	COLETA DE TESTE RÁPIDO COVID-19 - ANTÍGENO		Revisão: 01/11/2022
	Elaborador: Enf ^a Fernanda Machado	Revisor: Enf ^a Fernanda Machado e Enf ^a Fabiane Freitas	Data da elaboração: 10/11/2021
	Aprovador: Comissão de Padronização dos Serviços de Saúde		Número de Páginas: 6

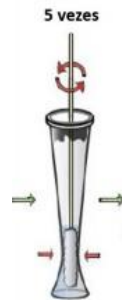


- ✓ Remova o swab, garantido que o máximo do material permaneça no tubo. Descarte o swab no resíduo infectante;



- ✓ Insira a tampa novamente no tubo e certifique que está bem tampada. Agite gentilmente o frasco para misturar a amostra. Aguarde 1 minuto;

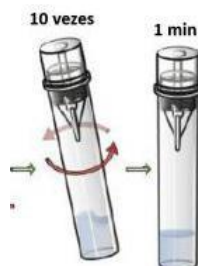

- ✓ Remova a tampa de proteção do tubo e dispense 3 gotas na cavidade da amostra (B);

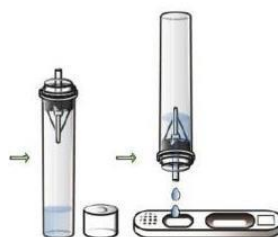


- ✓ Leia o resultado em 10 minutos. Não leia após 30 minutos;


5.3 Terceiro passo – interpretação do testes, laudo e afastamento

 PIRAQUARA PREFEITURA Secretaria de Saúde de Piraquara	Departamento de Vigilância em Saúde Telefone: 3590-3762 e-mail: saude.vem@piraquara.pr.gov.br		Coordenação de Vigilância em Saúde Código: POP DEVISA 02
	COLETA DE TESTE RÁPIDO COVID-19 - ANTÍGENO		Revisão: 01/11/2022
	Elaborador: Enf ^a Fernanda Machado	Revisor: Enf ^a Fernanda Machado e Enf ^a Fabiane Freitas	Data da elaboração: 10/11/2021
	Aprovador: Comissão de Padronização dos Serviços de Saúde		Número de Páginas: 6


O laudo e afastamento deverá ser realizado pelo enfermeiro ou médico, devidamente capacitado.

- ✓ A presença de apenas 1 linha, a de controle, o resultado indicará NEGATIVO;

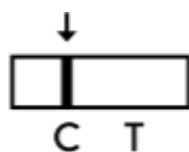


 PIRAQUARA PREFEITURA Secretaria de Saúde de Piraquara	Departamento de Vigilância em Saúde Telefone: 3590-3762 e-mail: saude.vem@piraquara.pr.gov.br		Coordenação de Vigilância em Saúde Código: POP DEVISA 02
	COLETA DE TESTE RÁPIDO COVID-19 - ANTÍGENO		Revisão: 01/11/2022
	Elaborador: Enf ^a Fernanda Machado	Revisor: Enf ^a Fernanda Machado e Enf ^a Fabiane Freitas	Data da elaboração: 10/11/2021
	Aprovador: Comissão de Padronização dos Serviços de Saúde		Número de Páginas: 6

- ✓ A presença de 2 linhas, a linha teste e a linha controle, o resultado indicará POSITIVO;
 OBS: a presença de qualquer linha teste (T), não importa o quão tênue, indica resultado positivo.

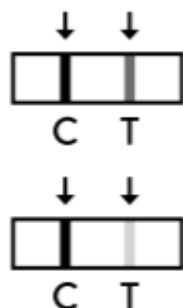

- ✓ A presença de apenas a linha teste, sem presença de linha controle, o resultado é considerado inválido. Realizar nova coleta;

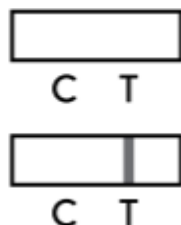

5.4 Realizar toda documentação, independente do resultado é necessário:

- ✓ Laudo do teste, assinado pelo enfermeiro, cirurgião dentista, farmacêuticos ou médico;
- ✓ Notificação que deverá ser entregue a vigilância epidemiológica semanalmente;
- ✓ Afastamento poderá ser realizado pelo enfermeiro, cirurgião dentista, farmacêutico ou médico, mantendo afastado o paciente por 10 dias após o primeiro dia de sintomas;
- ✓ Pacientes com resultado positivo, mas assintomáticos, não há necessidade de consulta médica, realizar as orientações de isolamento e piora do quadro procurar urgente atendimento;
- ✓ Pacientes com resultado positivo e apresentando sintomas leves, deverão passar por consulta médica;
- ✓ Pacientes positivos apresentando sintomas graves, deverão ser encaminhados imediatamente aUPA.

 PIRAQUARA PREFEITURA Secretaria de Saúde de Piraquara	Departamento de Vigilância em Saúde Telefone: 3590-3762 e-mail: saude.vem@piraquara.pr.gov.br		Coordenação de Vigilância em Saúde Código: POP DEVISA 02
	COLETA DE TESTE RÁPIDO COVID-19 - ANTÍGENO		Revisão: 01/11/2022
	Elaborador: Enfª Fernanda Machado	Revisor: Enfª Fernanda Machado e Enfª Fabiane Freitas	Data da elaboração: 10/11/2021
	Aprovador: Comissão de Padronização dos Serviços de Saúde		Número de Páginas: 6

6. HISTÓRICO DE REVISÃO DO POP

Nº da Revisão	Item	Alteração	Data da Elaboração
01		Incluído itens	02/06/2022
02		Alteração do layout	01/11/2022

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. Coronavírus. Curitiba, 2021. Disponível em: <http://www.saude.pr.gov.br/Pagina/Coronavirus-COVID-19>.

INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULAR DO PARANÁ. Manual de teste rápido COVID Ag. Curitiba, 2021. Disponível em: <https://www.ibmp.org.br/pt-br/teste-rapido-covid-ag/>

FIOCRUZ. TR DPP COVID-19 Ag, Bio-Manguinhos. Rio de Janeiro, 2021. Disponível em: <https://www.bio.fiocruz.br › reativos › testes-rapidos>