

 PIRAQUARA PREFEITURA Secretaria de Saúde de Piraquara	Departamento de Média e Alta Complexidade Telefone: (41) 3590 3700 regulacao@piraquara.pr.gov.br		Coordenação de urgência e emergência
			Código: POPUE01
	LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE AMBULANCIAS		Revisão:
	Elaborador: Paolla Boazegevski Velho	Revisor:	Data da elaboração: 06/09/2022
Aprovador: Comissão de Padronização dos Serviços de Saúde		Quantidade de Páginas: 5	

1. INTRODUÇÃO

Com a finalidade de minimizar o risco da ambulância ser uma fonte de contaminação aos pacientes e à equipe, é fundamental e imprescindível o estabelecimento de normas e protocolos de controle de infecção, particularmente no que tange a limpeza e desinfecção, baseada em evidências científicas e de baixo custo financeiro

2. EXECUTORES

- ✓ Auxiliar Operacional (limpeza);
- ✓ Motorista/Condutor;
- ✓ Auxiliar, Técnico de Enfermagem ou Enfermeiro;

3. OBJETIVOS

- ✓ Orientar aos profissionais da equipe de higiene/transporte sobre a técnica correta de limpeza e desinfecção interna de ambulâncias a fim de garantir ao ambiente, mobiliários e equipamentos condições seguras de uso, proporcionando aos pacientes e equipe de saúde bem-estar, conforto e segurança.

4. MATERIAIS

- ✓ Panos de limpeza descartável (perfex);
- ✓ Hipoclorito de Sódio 1%, ácido Peracético 0,2% ou álcool a 70% ou outro desinfetante (aprovado pela ANVISA);
- ✓ Luvas de borracha – luvas destinadas para piso, recolhimento de resíduos; e outra luva (coloração diferente) para limpeza de teto, paredes, portas e mobílias)
- ✓ Avental descartável;
- ✓ Máscara cirúrgica;
- ✓ Óculos de proteção;
- ✓ Sapato fechado
- ✓ Saco de lixo branco e preto;
- ✓ Caixa de pérfuro-cortante.

5. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

- ✓ O profissional responsável pela ambulância ou o condutor auxiliará o procedimento, retirando os acessórios e equipamentos da ambulância para que o auxiliar de limpeza realize a limpeza;
- ✓ Higienizar as mãos;
- ✓ Reunir o material necessário;

 <p>PIRAQUARA PREFEITURA</p> <p>Secretaria de Saúde de Piraquara</p>	Departamento de Média e Alta Complexidade Telefone: (41) 3590 3700 regulacao@piraquara.pr.gov.br		Coordenação de urgência e emergência
			Código: POPUE01
	LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE AMBULANCIAS		Revisão:
	Elaborador: Paolla Boazegevski Velho	Revisor:	Data da elaboração: 06/09/2022
Aprovador: Comissão de Padronização dos Serviços de Saúde		Quantidade de Páginas: 5	

- ✓ Paramentar-se com os EPIs.
- ✓ Colocar as luvas de cor disponível;
- ✓ Borrifar no pano descartável o saneante (álcool 70%, hipoclorito 1% ou ácido Peracético 0,2% ou outro saneante registrado na ANVISA) e friccionar nas superfícies, bancadas, macas e cadeiras por 30 segundos, pelo menos.
- ✓ Reorganizar os acessórios e equipamentos na ambulância;
- ✓ Higienizar as luvas verdes com água e sabão, enxaguar, borrifar o saneante e armazenar as luvas limpas e secas;
- ✓ Lavar as mãos;
- ✓ Coloca as luvas de outra cor;
- ✓ Recolher os resíduos, armazenar no container;
- ✓ Higienizar o piso utilizando saneante
- ✓ Higienizar as luvas com água e sabão, enxaguar, borrifar saneante e armazenar as luvas limpas e secas;
- ✓ Higienizar as mãos;
- ✓ Comunicar o responsável pela ambulância o término do procedimento;
- ✓ Registrar o procedimento em livro controle (Quando limpeza terminal semanal).
- ✓ Acondicionar o lixo e o material utilizado nos sacos de lixo apropriados e/ou caixa de pérfuro cortante;

6. OBSERVAÇÕES

- ✓ A limpeza deverá ser realizada por profissional da limpeza (auxiliar operacional), designado sob a supervisão do responsável da ambulância;
- ✓ Quanto à limpeza:
 - Do teto - deve ser realizada uma vez por semana, no mínimo, pano descartável e saneante com movimentos de dentro para fora;
 - Das paredes - deve ser realizada diariamente com pano de limpeza descartável e saneante com movimentos unidirecionais de cima para baixo;
 - Das bancadas, macas e cadeiras - deve ser realizada diariamente com pano descartável e saneante e com movimentos unidirecionais;
 - Pisos - deve ser realizada com saneante.
- ✓ A higiene diária (equipamentos, maca) deverá ser realizada sempre que houver transferência simples de paciente, ou seja, sem precaução de contato;
- ✓ A limpeza terminal (higienização de toda a ambulância) deve ser realizada uma vez por semana, ou na utilização por pacientes em precaução de contato

 PIRAQUARA PREFEITURA Secretaria de Saúde de Piraquara	Departamento de Média e Alta Complexidade Telefone: (41) 3590 3700 regulacao@piraquara.pr.gov.br		Coordenação de urgência e emergência
			Código: POPUE01
	LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE AMBULANCIAS		Revisão:
	Elaborador: Paolla Boazegevski Velho	Revisor:	Data da elaboração: 06/09/2022
Aprovador: Comissão de Padronização dos Serviços de Saúde		Quantidade de Páginas: 5	

Limpeza e Desinfecção de Superfícies e Equipamentos pela Equipe de Enfermagem			
Item	Limpeza	Desinfecção	Armazenamento
Esfigmomanômetro. Estetoscópio.	Passar um pano limpo umedecido com água e detergente neutro retirando as sujidades visíveis (caso presentes). Retirar detergente com pano umedecido com água limpa	Friccionar com desinfetante padronizado em toda a superfície a ser higienizada, deixando secar naturalmente.	
Colar Cervical.	Passar um pano limpo umedecido com água e detergente neutro retirando as sujidades visíveis (caso presentes). Retirar detergente com pano umedecido com água limpa	Friccionar com desinfetante padronizado em toda a superfície a ser higienizada, deixando secar naturalmente.	Embarcar em saco plástico e selar
Maca	Remover o excesso de resíduos com papel toalha ou pano, se necessário. Passar um pano limpo umedecido com água e detergente neutro retirando as sujidades, secar com pano limpo	Friccionar com desinfetante padronizado em toda a superfície a ser higienizada, deixando secar naturalmente.	
Caixa de emergência	Passar um pano limpo umedecido com água e detergente neutro retirando as sujidades visíveis (caso presentes). Retirar detergente com pano umedecido com água limpa	Friccionar com desinfetante padronizado em toda a superfície a ser higienizada, deixando secar naturalmente.	

 PIRAQUARA PREFEITURA Secretaria de Saúde de Piraquara	Departamento de Média e Alta Complexidade Telefone: (41) 3590 3700 regulacao@piraquara.pr.gov.br		Coordenação de urgência e emergência
			Código: POPUE01
	LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE AMBULANCIAS		Revisão:
	Elaborador: Paolla Boazegevski Velho	Revisor:	Data da elaboração: 06/09/2022
Aprovador: Comissão de Padronização dos Serviços de Saúde		Quantidade de Páginas: 5	

Limpeza e Desinfecção de Dispositivos Respiratórios pela Equipe de Enfermagem			
Item	Limpeza	Desinfecção	Armazenamento
Umidificadores de Oxigênio (O2). Traquéias de Macronebulização. Máscaras, copos e intermediário de Micronebulização. Frascos de Aspiração, Traquéias, máscaras e válvulas de BIPAP. Traquéias de Respiradores. Ambu (completo), Cânula de Guedel.	Detergente Neutro, enxague em água corrente	Encaminhar para o CME para desinfecção (Seguir rotina de POPs)	
Fluxômetros, válvulas de Macro/umidificadores de O2.	Detergente neutro, enxague em água corrente e secar	Friccionar com desinfetante padronizado	Deixar secar por 10 min, embalar em sacos plásticos e identificar.
Lâminas de laringoscópio	Realizar a limpeza com detergente neutro, enxague em água corrente	Ácido peracético 1%. enxague e secagem.	Secar, embalar em sacos plásticos e identificar.
Cabo do laringoscópio	Desconectar a Lâmina do Cabo, retirar pilhas e lâmpada.	Friccionar com desinfetante padronizado	

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

UFSC. Universidade Federal de Santa Catarina. Procedimento Operacional Padrão/CCIH/HU/UFSC: POP 4- Rotina de limpeza e desinfecção de superfícies. Disponível em <http://www.hu.ufsc.br/setores/ccih/wpcontent/uploads/sites/16/2015/05/Rotina-de-Limpeza-e-Desinfec%C3%A7%C3%A3o-de-Superf%C3%ADcies.pdf>. Acesso em 16/01/2018.

Procedimento Operacional Padrão/CCIH/HU/UFSC: POP 5- Rotina de limpeza e desinfecção de materiais de terapia respiratória. Disponível em <http://www.hu.ufsc.br/setores/ccih/wpcontent/uploads/sites/16/2017/05/POP-5-Rotina-de-limpeza-e-desinfec%C3%A7%C3%A3o-de-materiais-deterapia-respirat%C3%B3ria-revisado-em-janeiro-2017.pdf>. Acesso em 16/01/2018.

 PIRAQUARA PREFEITURA Secretaria de Saúde de Piraquara	Departamento de Média e Alta Complexidade Telefone: (41) 3590 3700 regulacao@piraquara.pr.gov.br		Coordenação de urgência e emergência
			Código: POPUE01
	LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE AMBULANCIAS		Revisão:
	Elaborador: Paolla Boazegovski Velho	Revisor:	Data da elaboração: 06/09/2022
Aprovador: Comissão de Padronização dos Serviços de Saúde		Quantidade de Páginas: 5	

Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Segurança do paciente em serviços de saúde: limpeza e desinfecção de superfícies/Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Brasília: Anvisa, 2012. 118 p.

8. HISTÓRICO DE REVISÃO DO POP

Nº da Revisão	Item	Alteração	Data da alteração